

LipoCryo[®]

Zbavit se tuku přesně tam, kde potřebujete...

Neinvazivní liposukce nové generace

LipoCryo ničí tukové buňky chladem. Tento jev medicína nazývá kryolipolýza. Jedná se o uznanou a certifikovanou lékařskou metodou. Zasažená tukové buňky se nevratně poškodí a jsou z těla následně přirozeně odstraněny.



Jak probíhá LipoCryo zákrok ?

LipoCryo lze aplikovat na všech částech těla, kde je tukový polštářek. Nejžádanějšími partiemi jsou břicho, boky, vnitřní a vnější stehna, hýždě a záda.

Aktivací přístroje dojde k přesnému nasátí kůže s tukovou tkání do aplikační koncovky.

Jakmile je kůže ve správné pozici, je aktivována vlastní kryolipolýza - řízená aplikace teploty ~ 3°C s délkou trvání ~ 30 min. V průběhu aplikace budete cítit mírný tlak a zpočátku i lokalizovaný pocit chladu, který rychle ustupuje. LipoCryo aplikace je pohodlná, můžete při ní relaxovat, poslouchat hudbu, sledovat televizi nebo třeba pracovat na notebooku... Obvykle se provádí během jedné návštěvy nasátí ve dvou lokalitách.

Jaké výsledky a kdy?

Tukové buňky v podkoží jsou zvláště citlivé na vystavení chladu. Při teplotě 3°C nejsou poškozeny ani nervy, svaly nebo žilky v místě aplikace, ale pouze tukové buňky. Tuto teplotu LipoCryo pečlivě monitoruje a podle ní reguluje kryolipolýzu. LipoCryo tak trvale odstraňuje tukové buňky bez poškození okolních tkání. V závislosti na původní síle tukové tkáně je její průměrný úbytek 3-15mm, nebo-li ~ 25-45%. Takové výsledky medicína považuje za vynikající, srovnatelné s běžnou liposukcí, avšak s nespornými výhodami: metoda je nechirurgická, neinvazivní, bezbolestná a bezpečná. Výsledek LipoCryo začnete registrovat za ~ 2 týdny, kdy vrcholí likvidace tukových buněk, která trvá až do 6.týdne od aplikace. Po té jsou možné další 1-2 aplikace ve stejné lokalitě, je-li to třeba.


Bezpečnost především !

Myslete na své zdraví a rizika. Ne všechny přístroje na trhu, jsou lékařsky certifikované, některé používají teplot pod nulou, od kterých izolují kůži jenom vložkou, díky čemuž může dojít k omrzlině.

Některé neměří teplotu kůže a neřídí podle ní intenzitu kryolipolýzy.


LipoCryo má nejvyšší evropskou certifikaci medicínského přístroje, jeho aplikací jste v naprostém bezpečí.

 Před aplikací

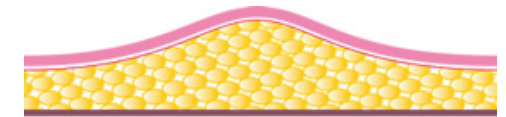

Before session

Během aplikace 

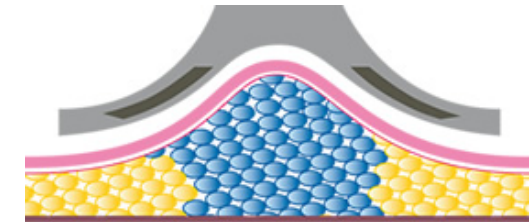

Lipocryo session





1.týden


Změna podkožního tuku





2.týden

Identifikace zmražených tukových buněk a začátek jejich likvidace

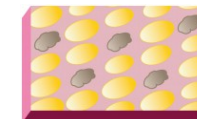



4.týden

Vrcholí odstraňování poškozených tukových buněk

... a Váš výsledek



After process